
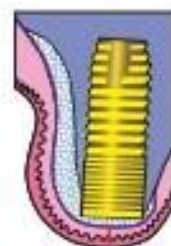


ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ПРОТОКОЛ ПРИМЕНЕНИЯ НАБОРА (SET) ОТ КОНЕКТБИОФАРМ ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ ПЕРИИМПЛАНТИТА, В СЛУЧАЕ ДЕФИЦИТА КОСТИ С ВЕСТИБУЛЯРНОЙ СТОРОНЫ

ВАРИАНТ 2


SET BioGap Bioguard

BIOGAP SET BIOGUARD

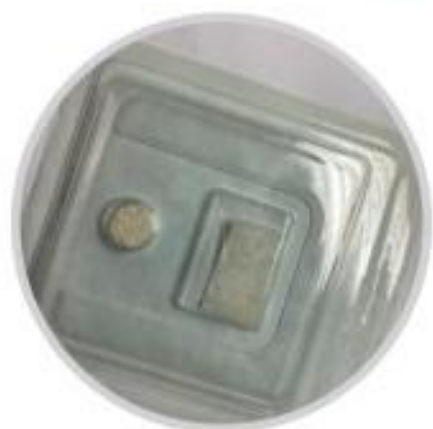


Кат №	Объем	Размер				Цена (набора) руб.
		\varnothing	h	l	b	
40600	Диск 0,3 см ³	10 мм	3 мм			3840
	Мембрана			25 мм	15 мм	


ИСХОДНАЯ СИТУАЦИЯ С ДЕФИЦИТОМ КОСТИ С ВЕСТИБУЛЯРНОЙ СТОРОНЫ

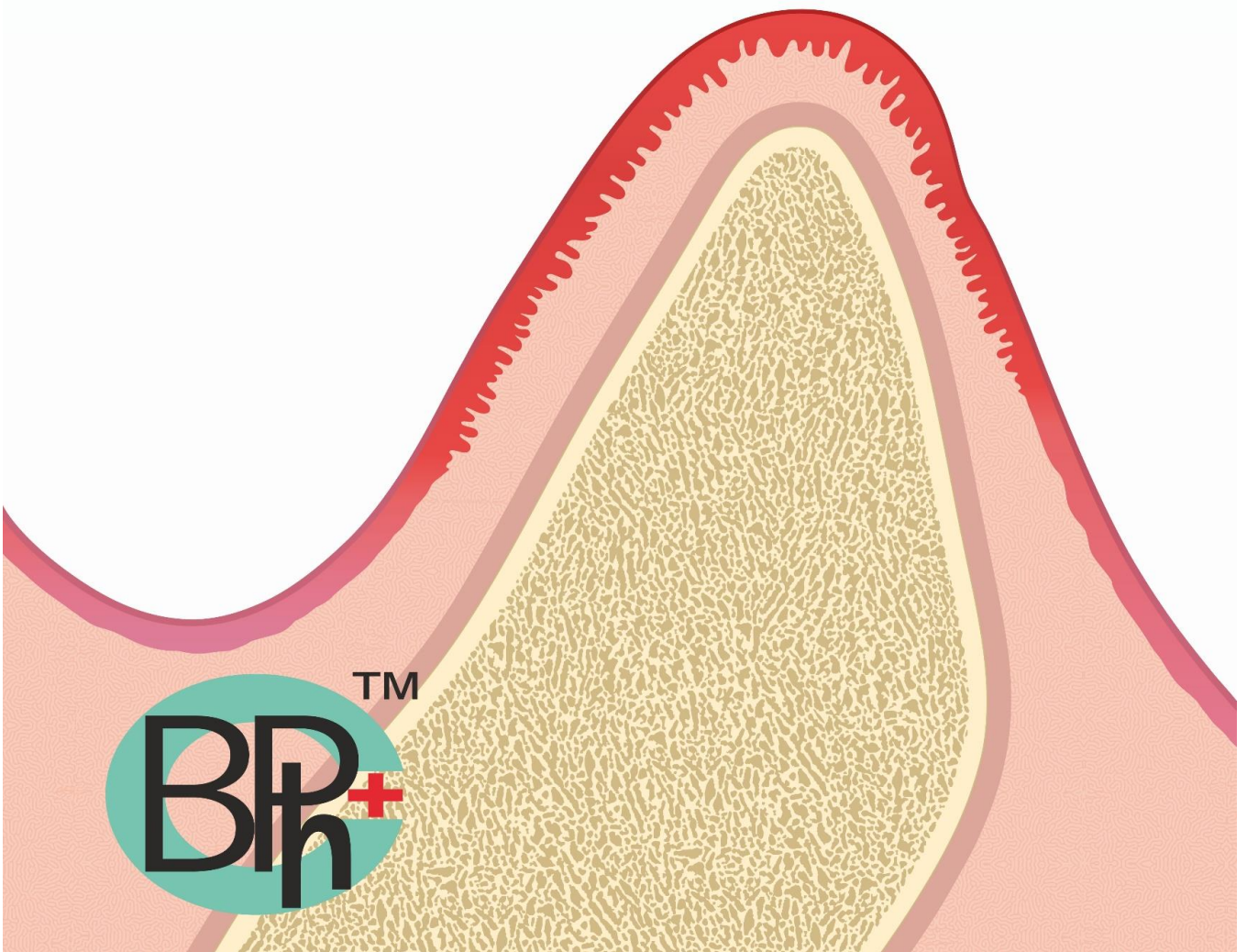

ПЛАНИРУЕМОЕ МЕСТО УСТАНОВКИ ИМПЛАНТАТА

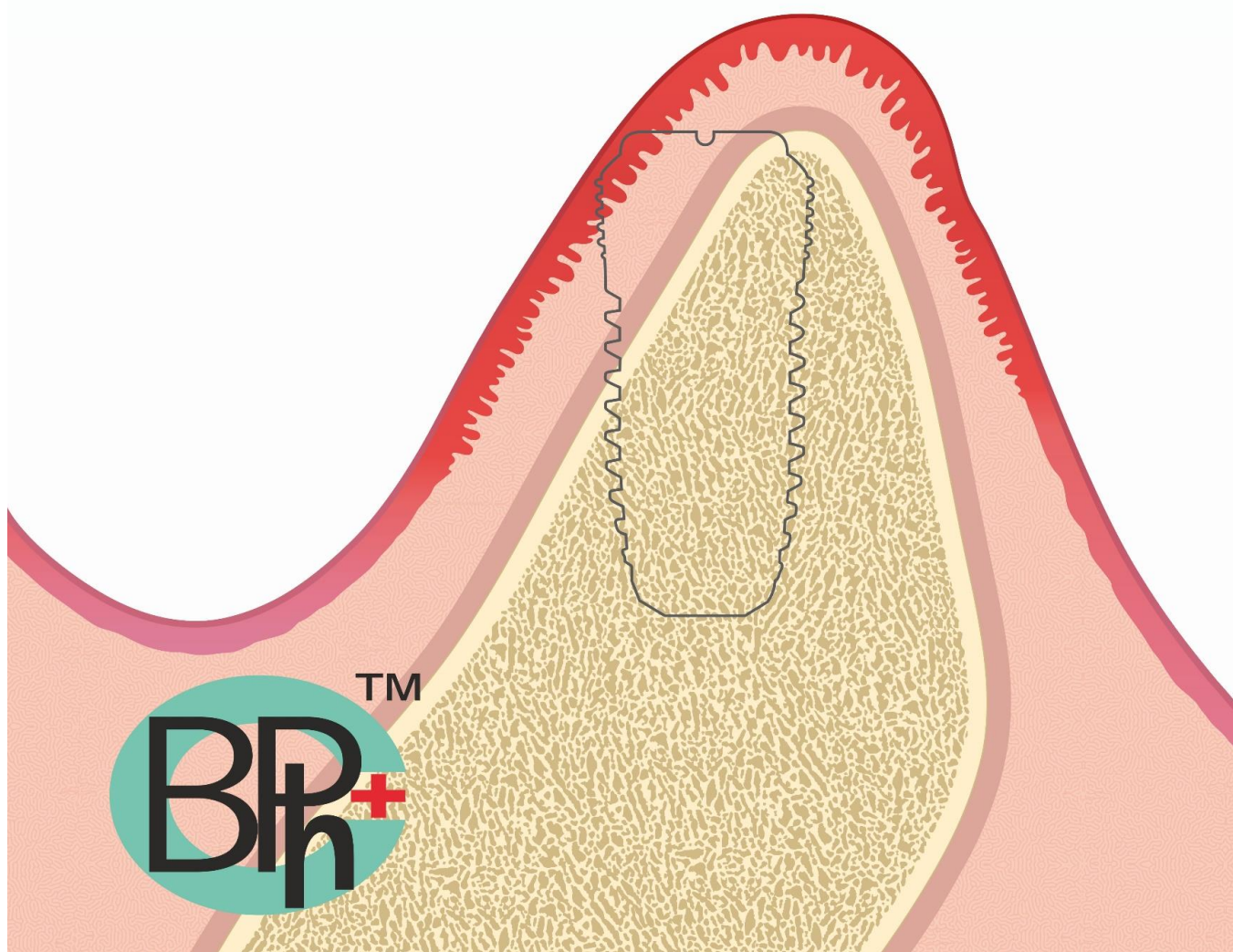


**ПРОИЗВОДИМ РАЗРЕЗ ПО СЕРЕДИНЕ -
«БЕЛОЙ ЛИНИИ» ГРЕБНЯ**

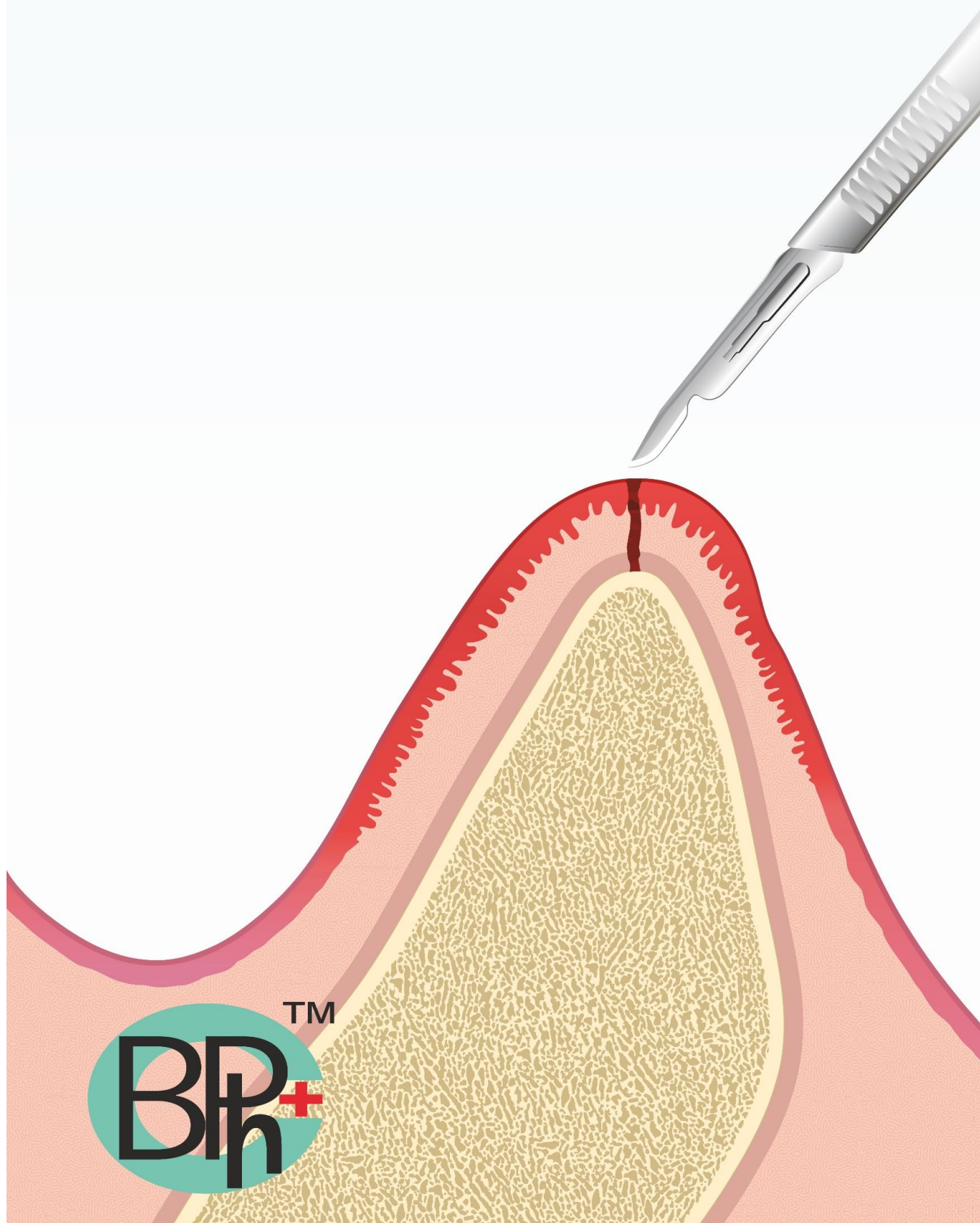


**СЕПАРИРУЕМ СЛИЗИСТУЮ ВЕСТИБУЛЯРНО
ДО ГРАНИЦЫ ПРИКРЕПЛЕННОЙ СЛИЗИСТОЙ**


*** С ЯЗЫЧНОЙ СТОРОНЫ НЕ БОЛЕЕ 7мм**

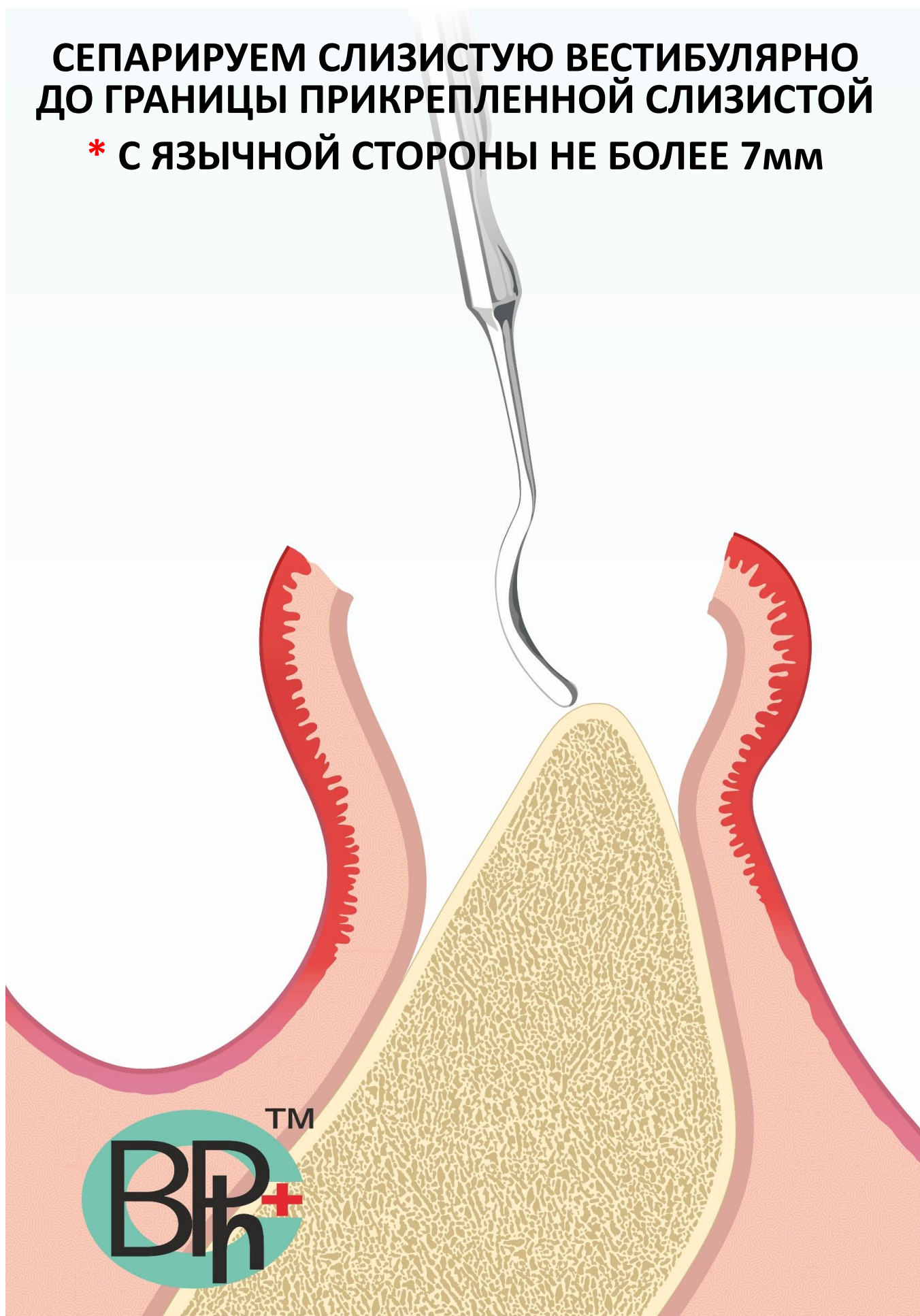


**ФОРМИРУЕМ «РАСЩЕПЛЁННЫЙ ЛОСКУТ»
С ВЕСТИБУЛЯРНОЙ СТОРОНЫ НА ГРАНИЦЕ
ПЕРЕХОДА НЕПОДВИЖНОЙ В ПОДВИЖНУЮ
СЛИЗИСТУЮ НАДРЕЗАЕМ НАДКОСТНИЦУ**

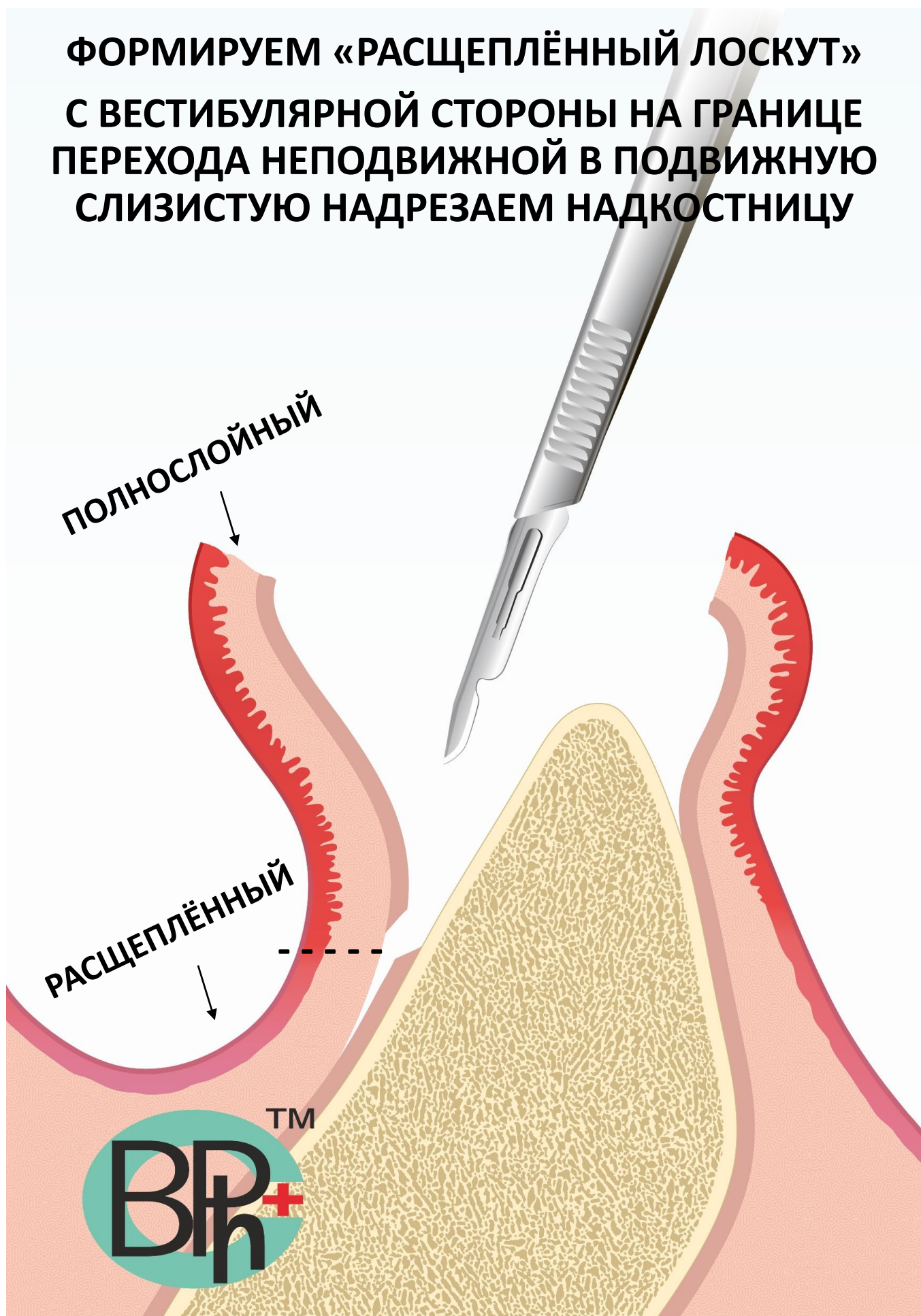


**ТУПЫМ ИНСТРУМЕНТОМ ОТДЕЛЯЕМ
МЫШЕЧНЫЙ СЛОЙ ОТ НАДКОСТНИЦЫ**

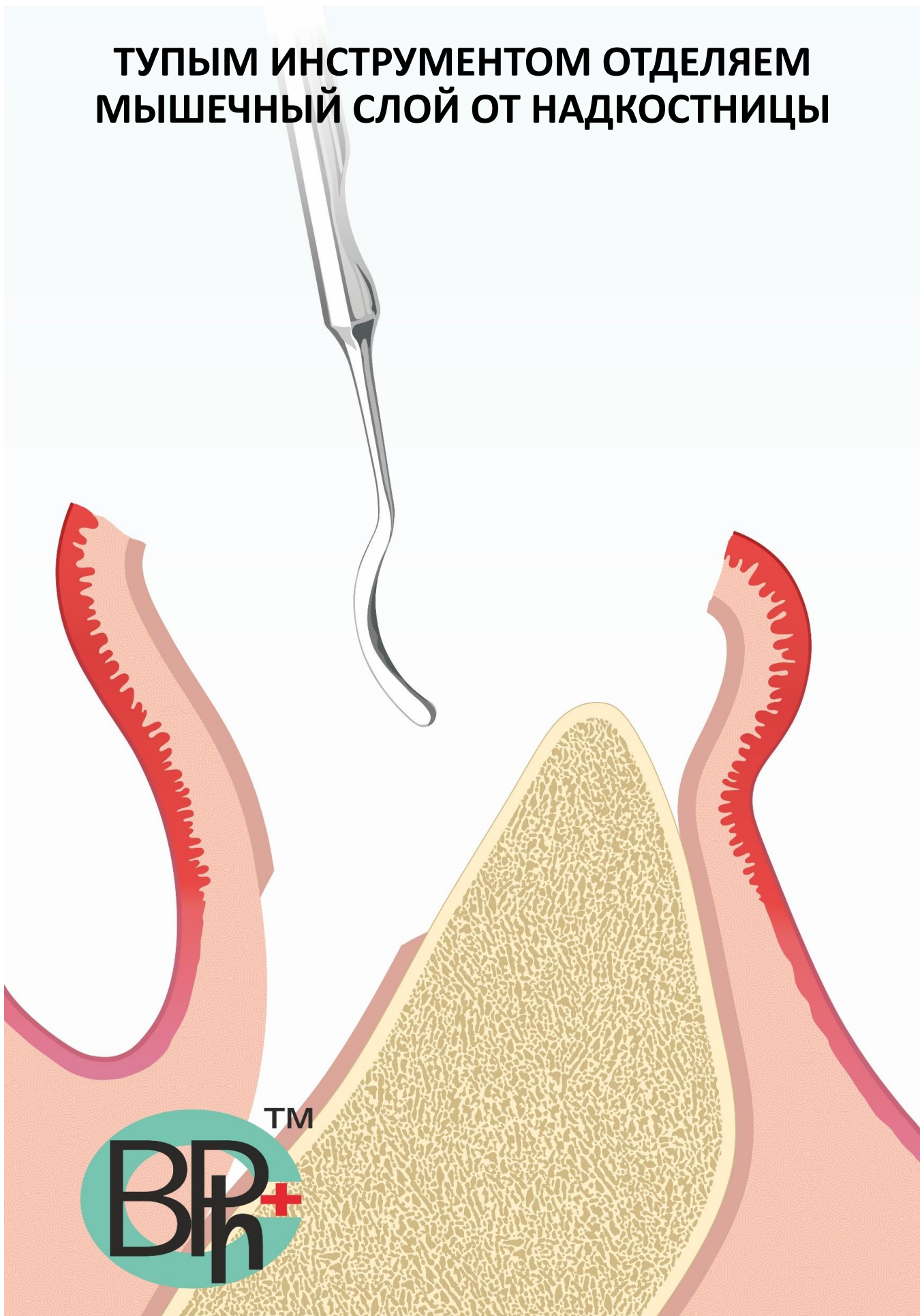


**ОТСЛАИВАЕМ НАДКОСТНИЦУ ОТ КОСТИ,
ФОРМИРУЕМ ПОДНАДКОСТНИЧНЫЙ КАРМАН
ДЛЯ МЕМБРАНЫ, ЧУТЬ НИЖЕ УРОВНЯ АПЕКСА
БУДУЩЕГО УСТАНОВЛЕННОГО ИМПЛАНТАТА**

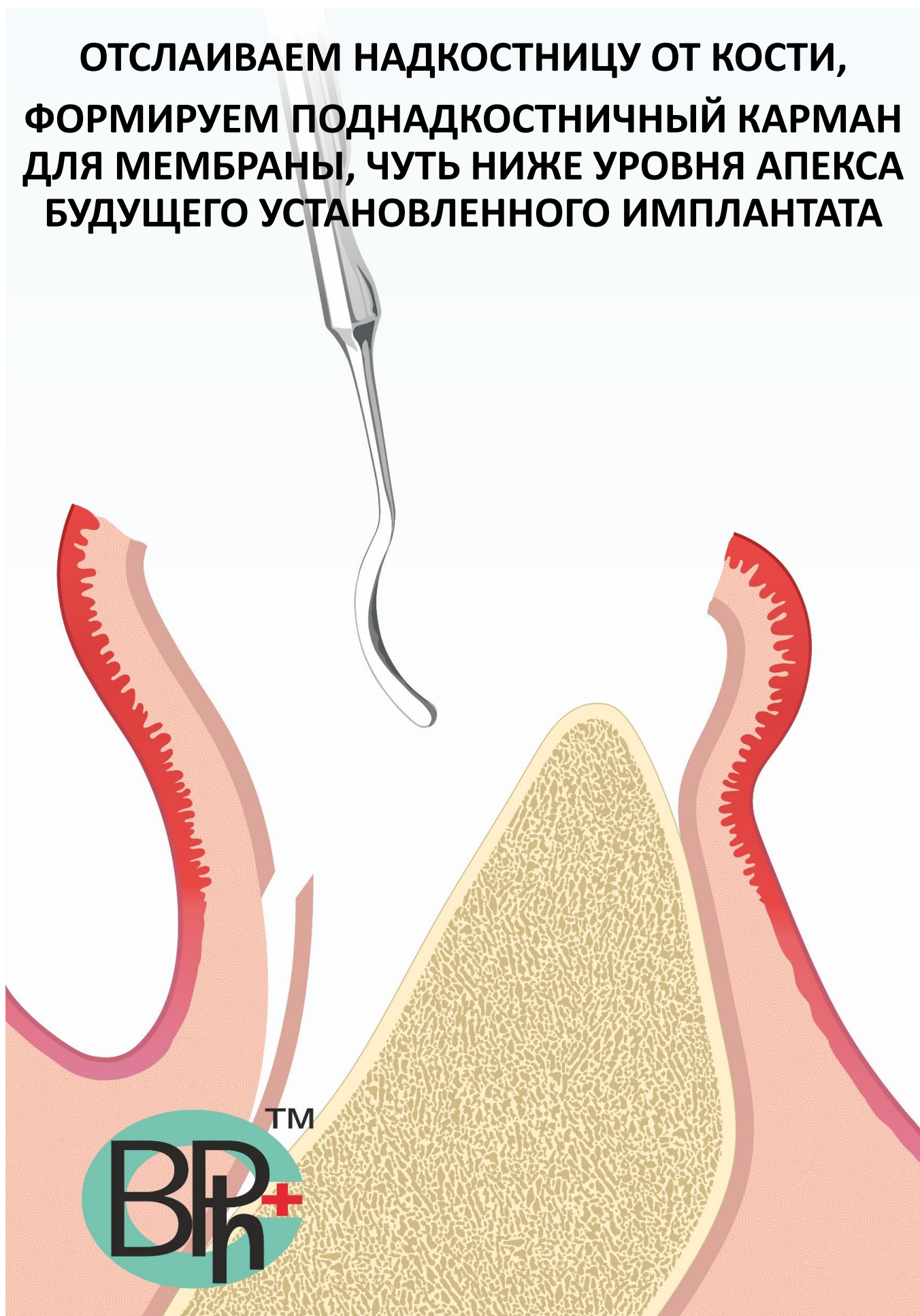


**ФОРМИРУЕМ ЛОЖЕ ДЛЯ УСТАНОВКИ
ИМПЛАНТАТА, СОБИРАЯ СВОЮ НАТИВНУЮ
КОСТЬ**

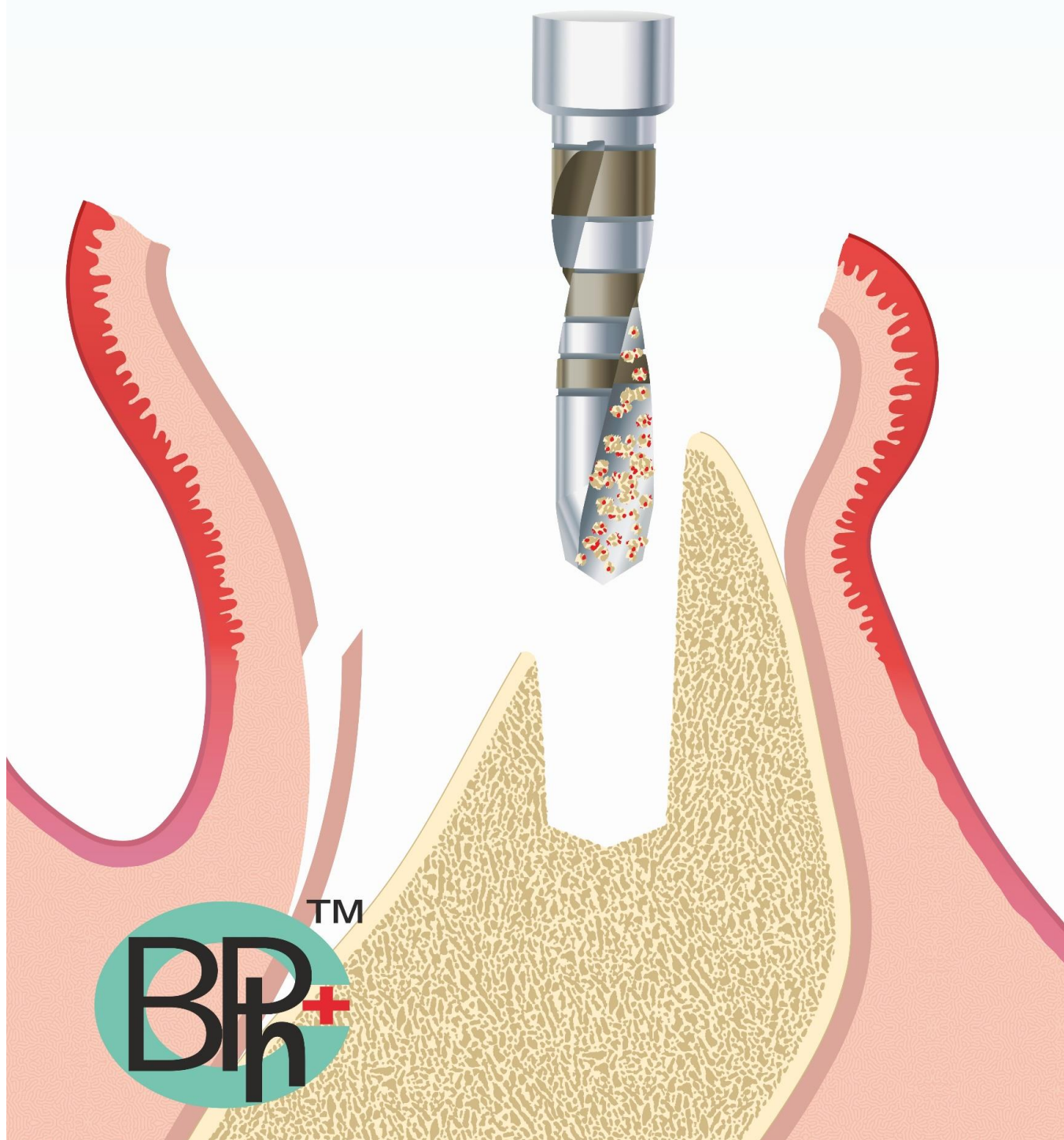


УСТАНАВЛИВАЕМ ИМПЛАНТАТ

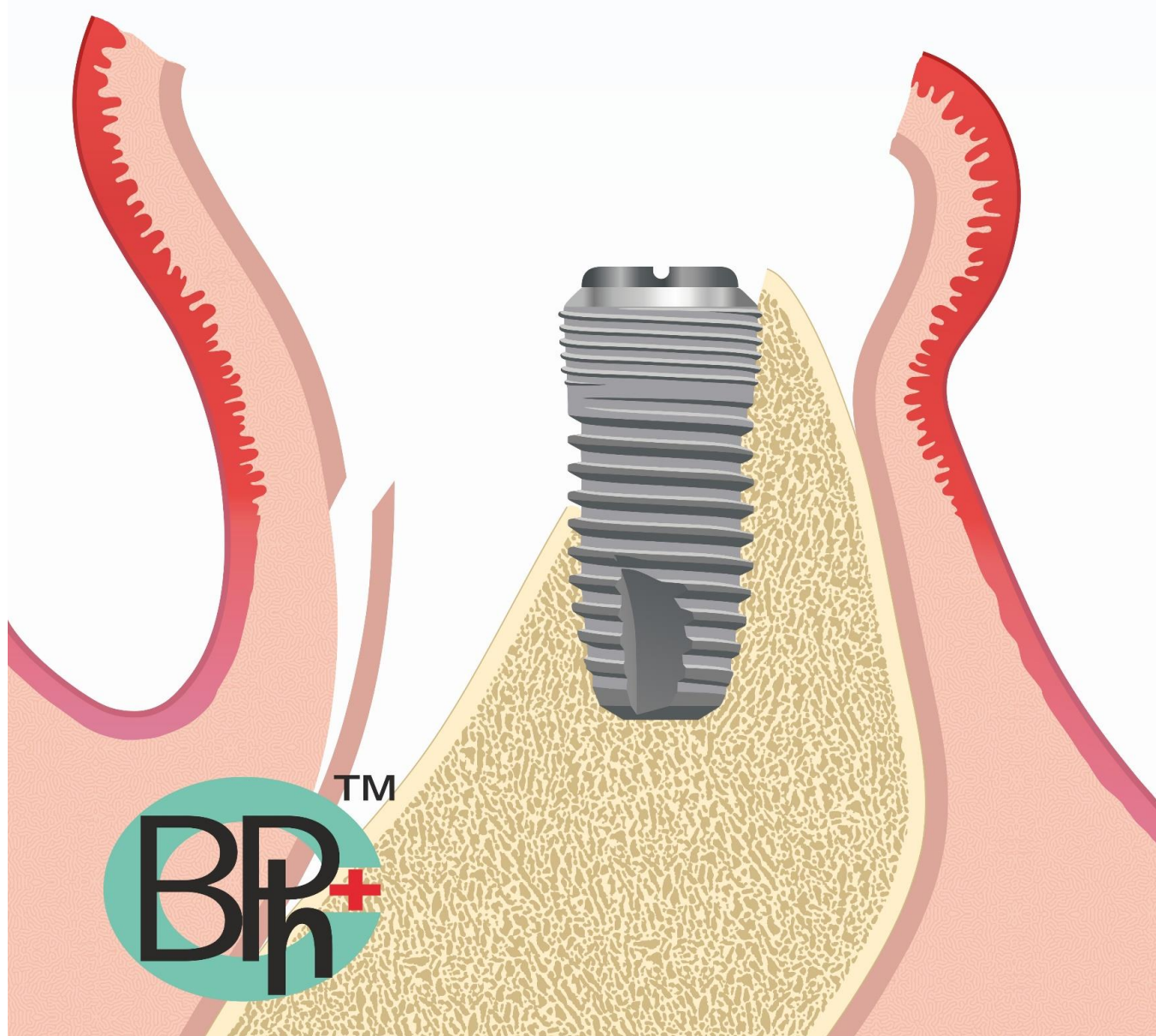

УКЛАДЫВАЕМ МЕМБРАНУ

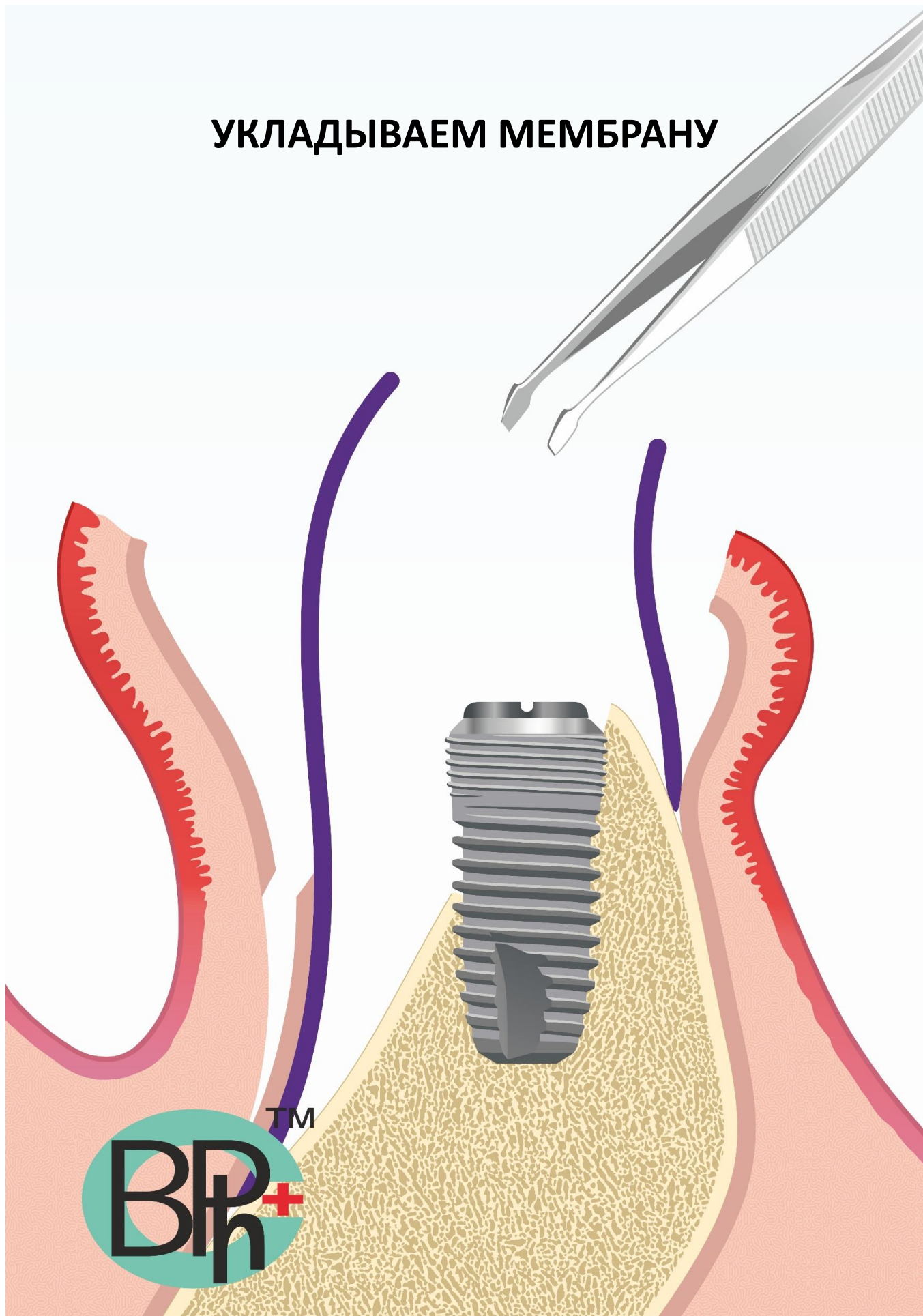


ВНОСИМ СВОЮ НАТИВНУЮ КОСТЬ

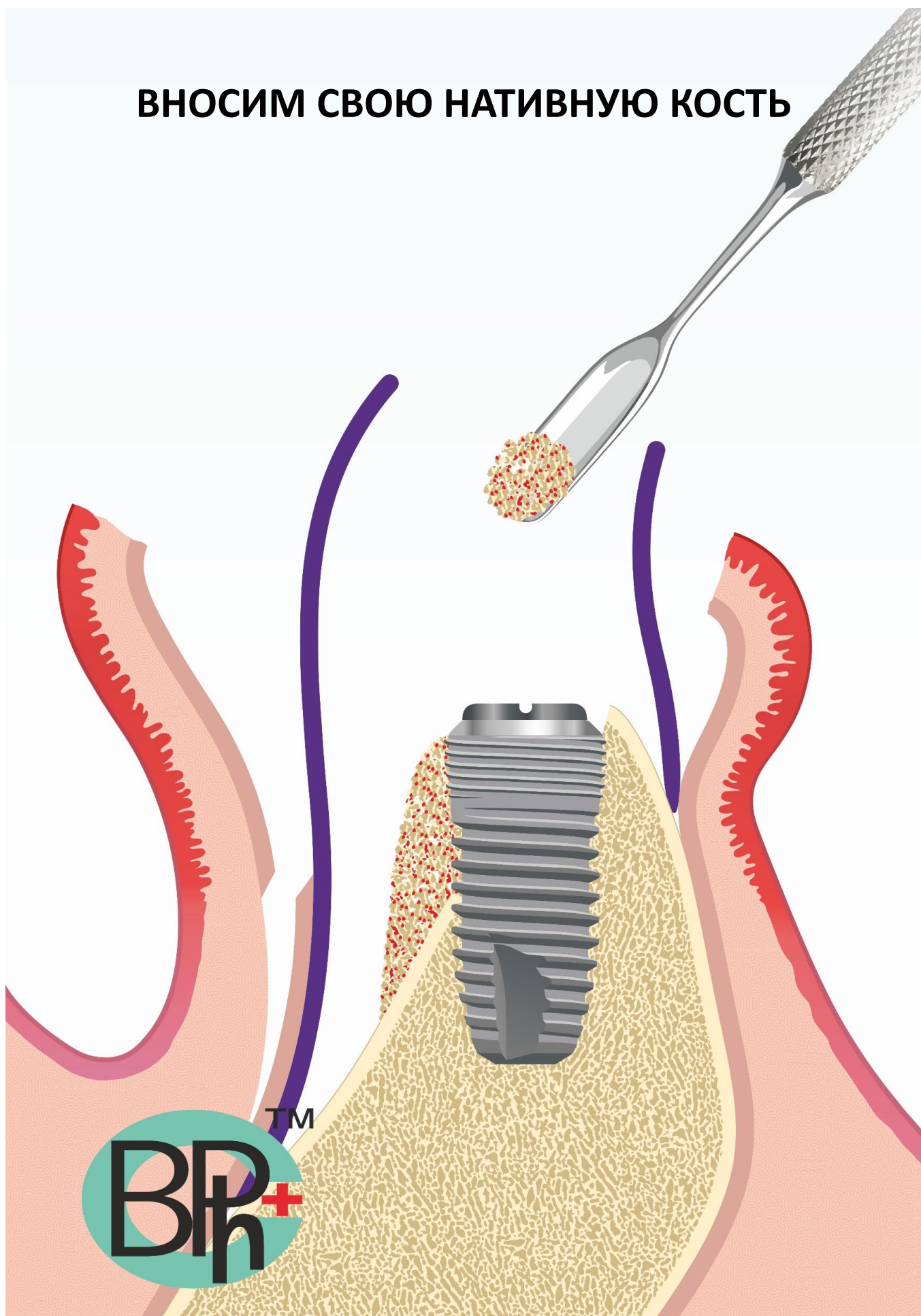


**ПРИ ПОМОЩИ ОСТЕОКОНДУКТИВНОГО
МАТЕРИАЛА ВОССТАНАВЛИВАЕМ УТРАЧЕННЫЙ
ОБЪЁМ КОСТИ С ВЕСТИБУЛЯРНОЙ СТОРОНЫ И
ЗАЩИЩАЕМ ИМПЛАНТАТ ОТ ФИБРОИНТЕГРАЦИИ,
А КОСТЬ ОТ РЕЗОРБЦИИ**


**ТОЛЬКО ПОЛНОСЛОЙНО,
НИКАКОГО СМЕШИВАНИЯ
МАТЕРИАЛОВ !!!**

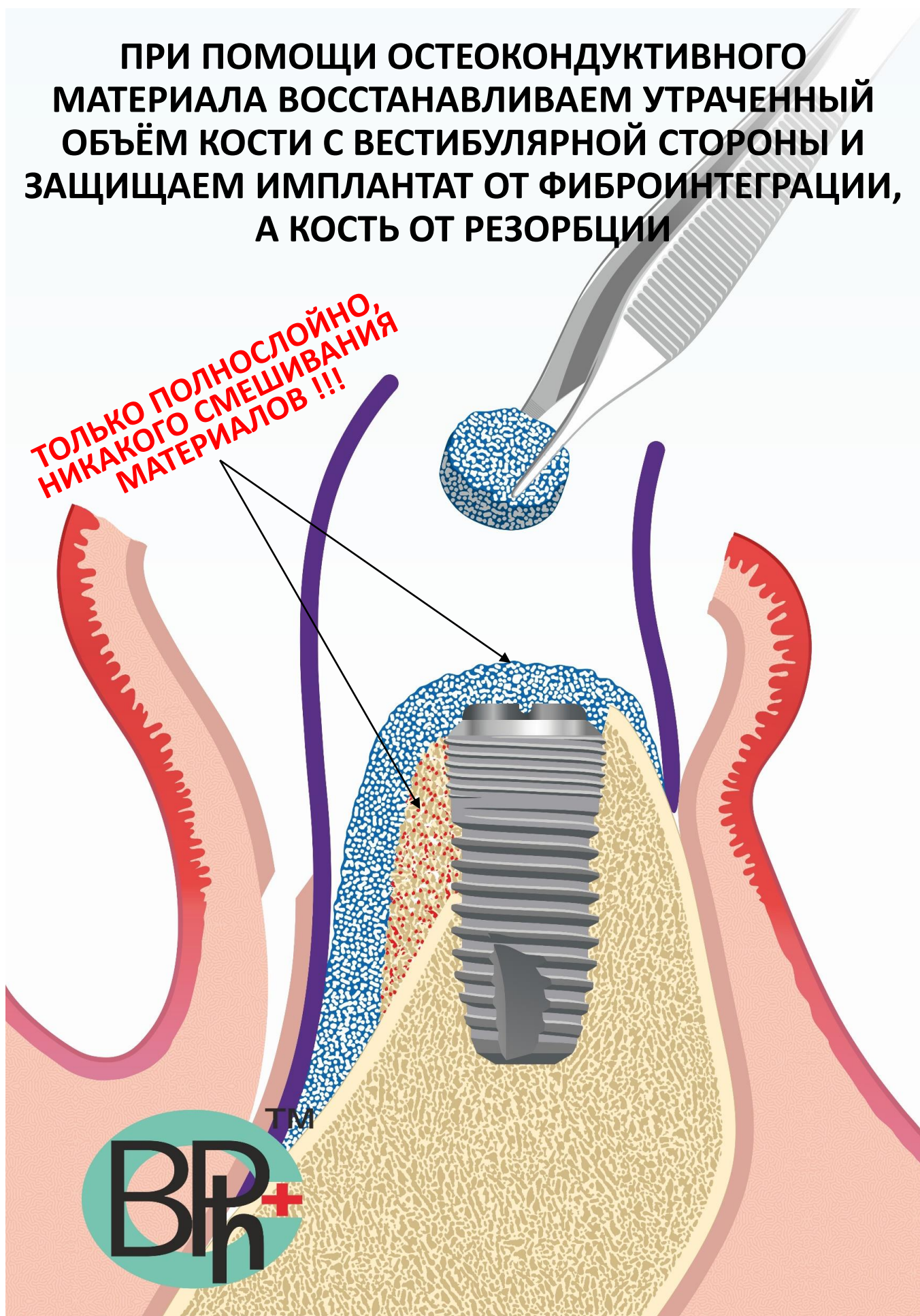


**«СХЛОПЫВАЕМ» МЕМБРАНУ
ПО ПРИНЦИПУ «ПАЛЬТО»**

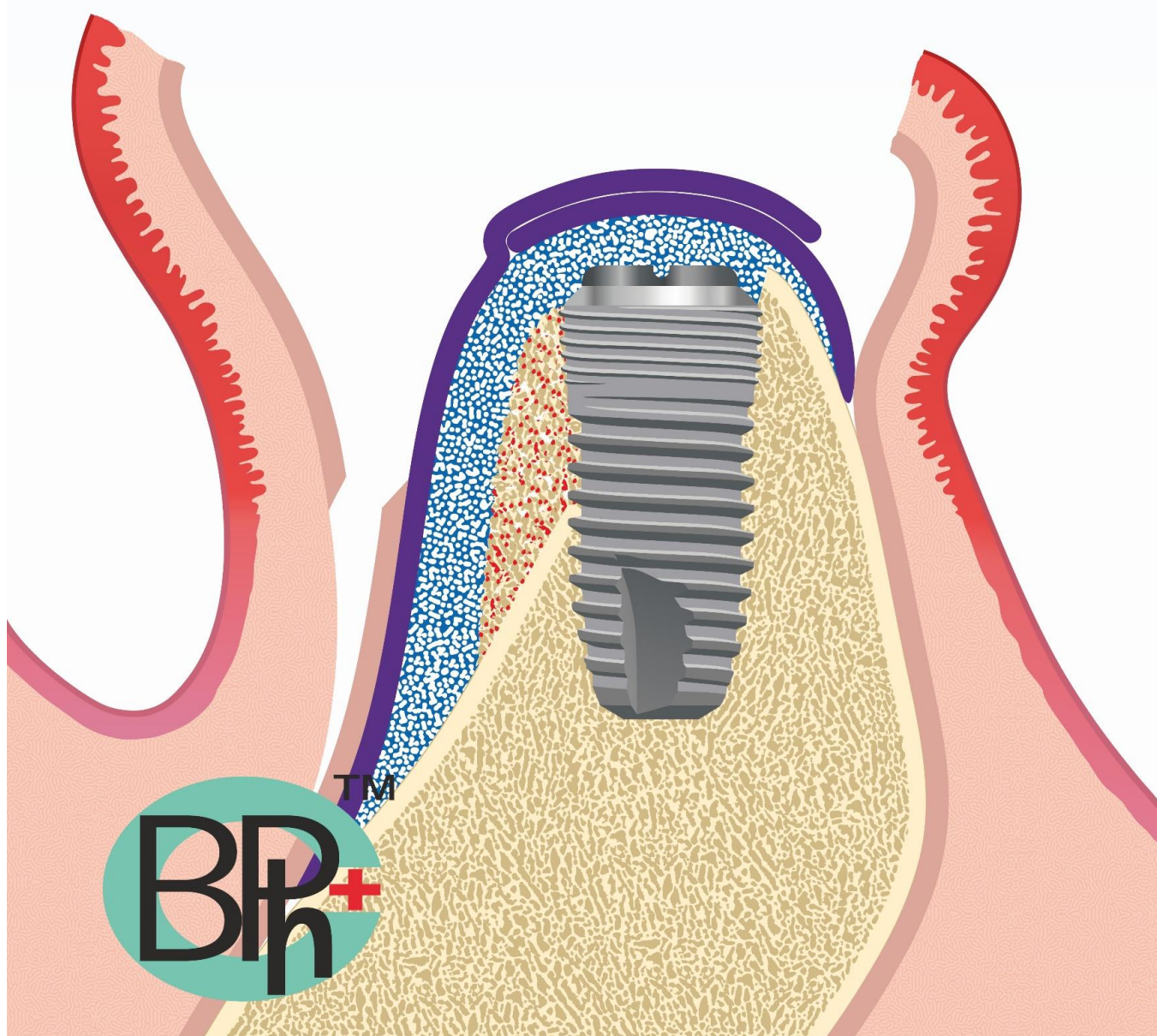

СВОДИМ КРАЯ СЛИЗИСТОЙ

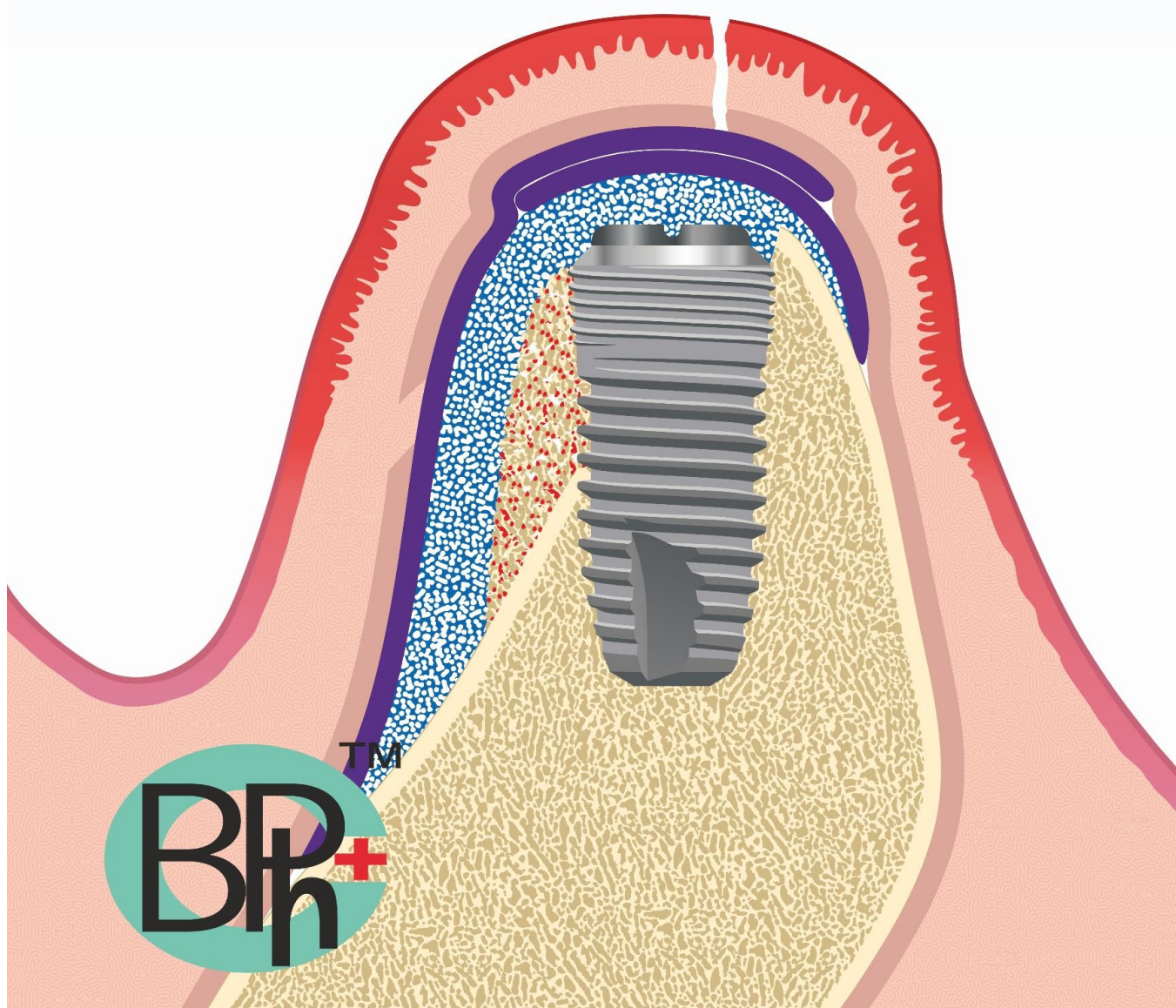


УШИВАЕМ СЛИЗИСТУЮ

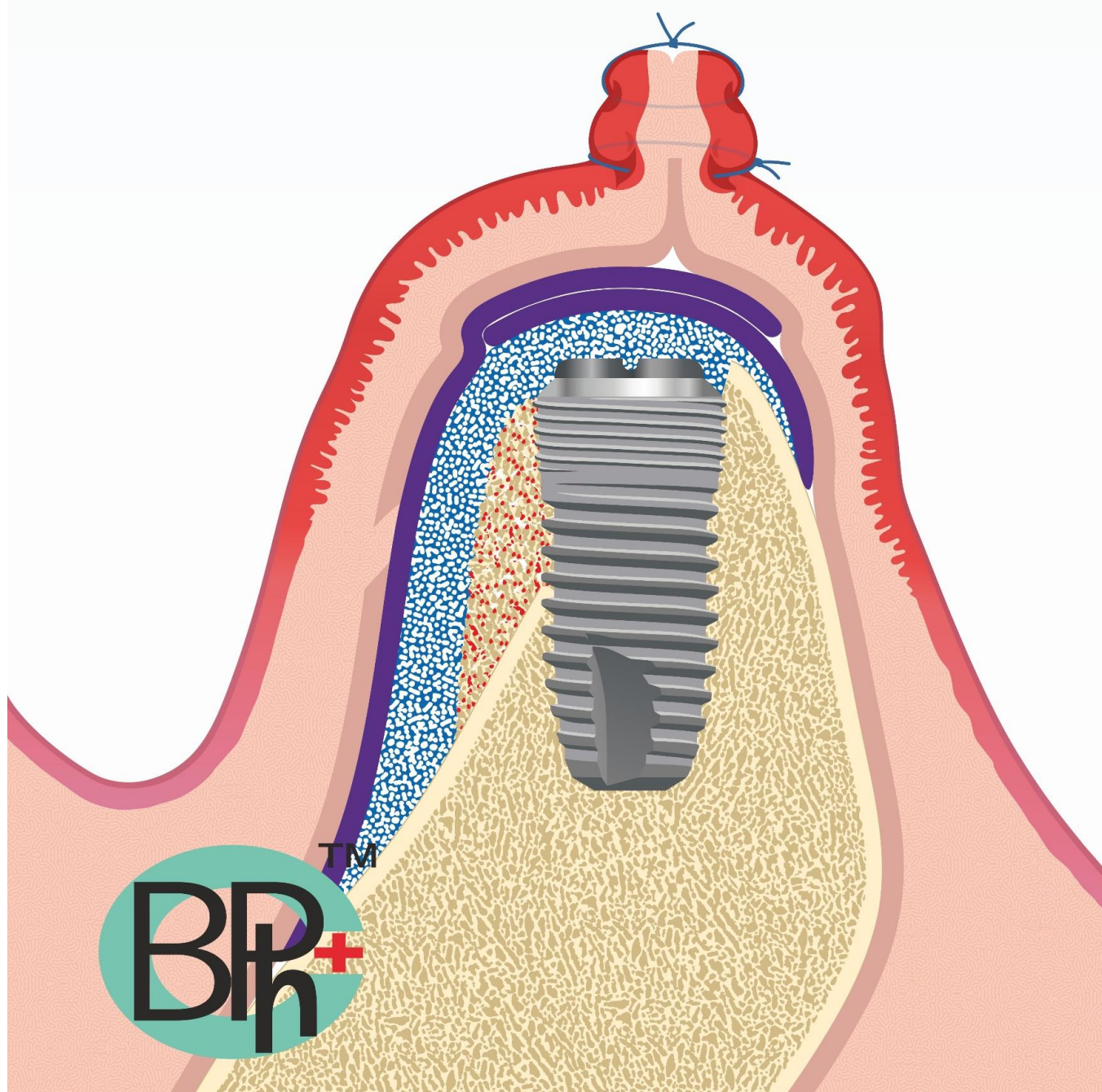

**ВАРИАНТ УШИВАНИЯ НА НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ,
РЕКОМЕНДОВАННЫЙ ИШТВАНОМ УРБАНОМ
И НАОШИ САТО**



**СМОТРЕТЬ ПОЛНЫЙ
ПРОТОКОЛ ЗДЕСЬ**

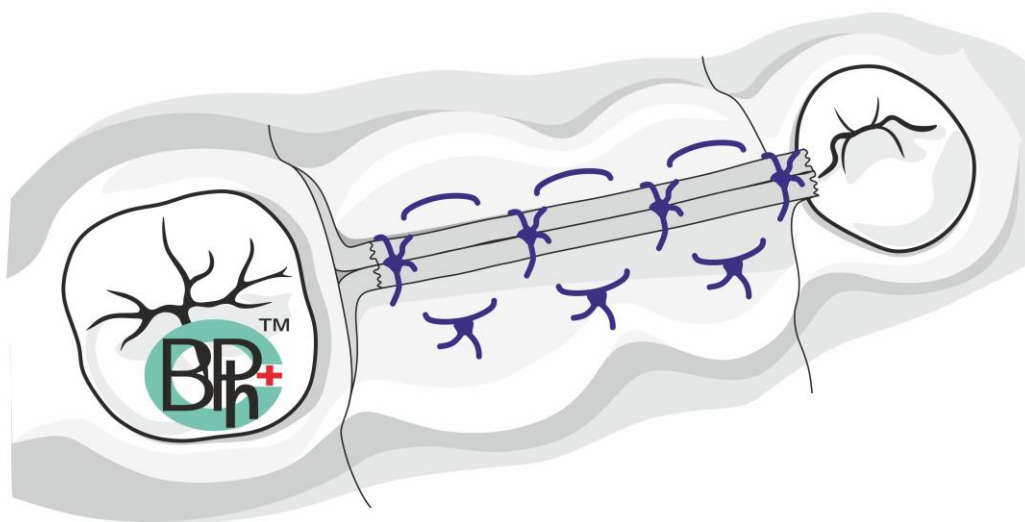

РЕЗУЛЬТАТ ЧЕРЕЗ 3 МЕСЯЦА

